


QUICKVUE[®]

Influenza A+B TEST

Prueba de Influenza

Diagnosticar influenza puede ser difícil. Una tercera parte de todas las infecciones respiratorias son causadas por la influenza. Esto nos lleva a miles de muertes y hospitalizaciones cada año. La prueba QuickVue de Influenza A+B le provee a usted un inmunoensayo que muestra resultados diferenciados para tipo A y tipo B luego de una fácil examinación en el consultorio medico o laboratorio.

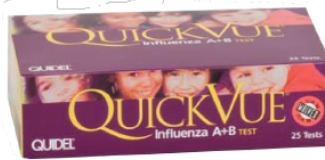

Un diagnóstico a tiempo y específico brinda una referencia importante en la elección de la terapia antiviral y permite evitar el sobreuso de antibióticos, además de prevenir costos relacionados con pruebas y tratamientos innecesarios.

La prueba QuickVue Influenza A+B es sensible y específica, y brinda los resultados necesarios en cualquier lugar y en cualquier momento.

Diagnóstico y Tratamiento Rápido

- Identifica Influenza tipo A o B en muestras positivas, en solo alrededor de 10 minutos para una mejor y más rápida determinación de resultados ante el paciente.

Detección Precisa

- La prueba de Influenza QuickVue A+B detecta ambos tipos de antígenos virales - A y B.
- Detección precisa con muestras de torunda nasal:
Sensibilidad del 94% y Especificidad del 90% para el tipo A
Sensibilidad del 70% y Especificidad del 97% para el tipo B
- Revise información anexa para mayor información de desempeño.

Fácil de Usar


- 3 Pasos
- 1 Reactivo, 90 segundos de recolección y aplicación de muestra
- 1 Solo procedimiento provee resultados para ambos tipos A y B

Empaque conveniente

- Cada kit contiene todo lo necesario para desempeñar la prueba, incluyendo torundas nasales y controles negativos positivos.
- Disponible en presentación de 25 pruebas por kit.
- Almacenaje por hasta 24 meses a temperatura de interior desde la fecha de manufactura.



Procedimiento de Torunda Nasal / Nasofaríngea

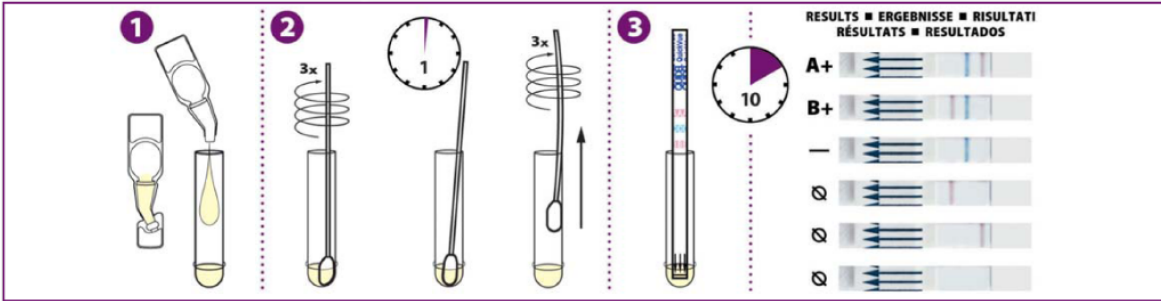

Torunda Nasal:

Sensibilidad A - 94%, B - 70%

Precisión: A - 91%, B - 93%

PV(+): A - 62%, B - 82%

PV(-): A-99%, B - 94%

Especificidad: A - 90%, B - 97%

Torunda Nasofaríngea

Sensibilidad A - 83%, B - 62%


Precisión: A - 88%, B - 94%

PV(+): A - 67%, B - 80%

PV(-): A-95%, B - 95%

Especificidad: A - 89%, B - 98%

Procedimiento de Lavado / Aspirado Nasal

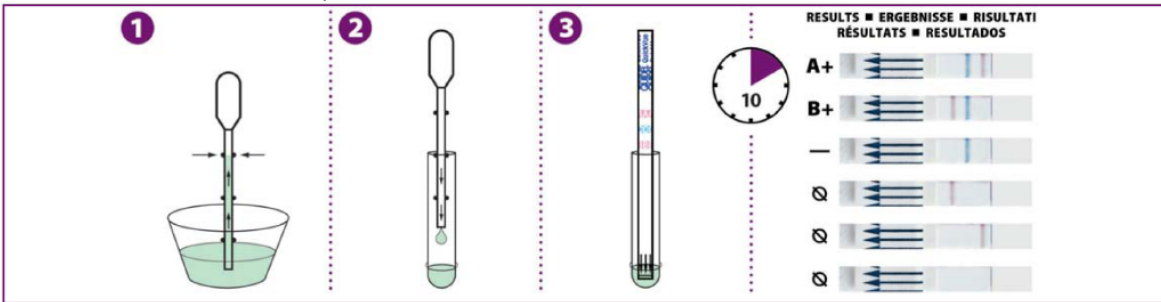

Lavado / Aspirado Nasal Fresco

Sensibilidad A - 77%, B - 82%

Precisión: A - 95%, B - 96%

PV(+): A - 91%, B - 90%

PV(-): A-96%, B - 97%

Especificidad: 99%

Lavado / Aspirado Nasal Congelado

Sensibilidad A - 86%, B - 62%

Precisión: A - 91%

PV(+): -93%

PV(-): A-93%

PV(-): A-90%

Especificidad: A - 95%

El desempeño de cualquier prueba rápida de influenza es dependiente de la colección y manejo de muestra en conformidad al inserto de la prueba. Visite nuestro sitio web o contáctenos para mayor información.



QuickVue® Influenza A+B – 25 Test Kit:
Catalog #20183



GENERAL DE APARATOS ANALÍTICOS MÉDICOS SA DE CV



Av. Río Blanco No. 779 C.P. 45130
Fracc. Mirador de San Isidro, Zapopan, Jal.
e-mail: ventas@gaamsa.com
01-800-111-8899 / 01-800-654-1673