

AimTab™ Reducing Substances Tablets

Las tabletas de sustancias reductoras AimTab™ son para la determinación semi-cuantitativa de la cantidad de sustancias reductoras (generalmente glucosa) en orina, heces, vino y otros líquidos.



Prueba Rápida de Glucosa, Lactosa, Fructosa y Galactosa!



Mismo procedimiento de prueba que Clinitest®, marca registrada y utilizada por Bayer HealthCare LLC.

AimTab™ Reducing Substances Tablets
Ref #13336, 36/botella

Método de 5 Gotas (Método de 2 Gotas también disponible)*

1. Con el gotero en posición vertical, coloque 5 gotas de muestra en el tubo de ensayo. Enjuague el gotero y agregue 10 gotas de agua al tubo de ensayo.
2. Coloque una tableta en el tubo de ensayo. Observe mientras se produce la reacción de ebullición completa. No agite el tubo de ensayo durante la ebullición, ni durante los siguientes 15 seg. después de que se haya detenido la ebullición.
3. Al final de este período de espera de 15 seg., agite suavemente el tubo de ensayo para mezclar el contenido. Compare el color del líquido con la Tabla de colores.
4. Anote el porcentaje (%) de resultado que aparece en el bloque de color que más se aproxima al color del líquido.

Pruebas que usted necesita,
¡Exactitud que nosotros brindamos!



Consulte el Instructivo para el Procedimiento Completo

- AimTab™ Reducing Substances Tablets
Ref #13320, 1 tableta/paquete, 20 paquetes/caja



- Resultados rápidos y fáciles para probar orina, heces, vino y otros líquidos.
- Detecta tan poco como 0.25 mg/dl de glucosa.
- Detecta glucosa y otros azúcares reductores tales como lactosa, fructosa, galactosa y pentosas.
- CAP / CLSI formato de procedimientos disponibles a través de fax o correo electrónico, sólo tiene que añadir su nombre!
- Almacenar a temperatura ambiente.
- Veneno: Provoca quemaduras graves. ¡No ingerir!

Productos Relacionados:

- Controles Líquidos UA, con/hCG, Ref #51116
2 x 5mL (1mL nivel 1, 1mL nivel 2)
Se utiliza para el control de la Glucosa.
Conservar entre 2° y 8°C.

Distribuido por: